

ANA 2000 HCAA Dental Alloy Duett®

Zubní amalgám s vysokým obsahem mědi

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobce:

Nordiska Dental AB

Poměr 1:1

400 (200) sáčků rtuti 390mg,

400 (200) tablet 390mg,



Pilínové částice. Složení: Ag 43,1%Sn 30,8%Cu 26,1%
Nordiska Dental AB, Ängelholm, Sweden

CE 0510**MÍCHÁNÍ**

ANA 2000 Duett se připravuje v poměru 1 : 1 (1tableta slitiny = 390mg, 1 sáček rtuti = 390 mg). Vícenásobně použitelné kapsle se mohou předem naplnit tabletami a sáčky (1+1 nebo 2+2). Rtuť není uvolněna dokud nedojde k vibraci kapsle. Při plnění kapslí používejte přiloženou pinzetu.

Míchání probíhá ve vícenásobně použitelné kapsli. Ruční rozmělnění není potřeba. Po namíchání klepněte kapslí o stůl a pak ji teprve otevřete. Po vyjmutí namíchaného amalgámu, odstraňte i prázdný sáček od rtuti.

MANIPULACE

Namíchaný amalgám podávejte po malých dávkách a dobře kondenzujte. Přepněte kavitu a poté odstraňte vrstvičku bohatou na rtuť. Ořežte do anatomického tvaru.

Tuhnutí je poněkud rychlejší než u konvenčního amalgámu, ale čas na opracování je stejný.

Produkt	Otáčky	Duett 1 + 1	Duett 2 + 2
ANA 2000	3500	13	14
	4000	8	10
	4500	7	9

Tyto údaje jsou platné pro amalgamátoary Silamat S5, Ultramat 2 a ProMix.

Doporučeno skladovat do 25°C. Jen pro dentální použití.

Doba míchání se může měnit podle stáří a výkonnosti přístroje. Amalgamátoary s vysokými otáčkami jsou doporučeny.

K zabránění ztráty hmotnosti tablet v důsledku vibrací, skladujte výrobek na pevné podložce.

Nordiska Dental AB, Box 1082, S-262 21 Ängelholm, Sweden.