

30ME

ANA 2000 HCAA Dental Alloy Kapsle
Zubní amalgám s vysokým obsahem mědi
NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobce:
Nordiska Dental AB

Poměr 1:1



Pílinové částice. Složení: Ag 43,1%Sn 30,8%Cu 26,1%
Nordiska Dental AB, Ängelholm, Sweden

CE 0510

MÍCHÁNÍ

Kapsle namíchejte v třepačce a poté otevřete podle vyobrazení.

MANIPULACE

Namíchaný amalgám podávejte po malých dávkách a dobře kondenzujte. Přepněte kavitu a poté odstraňte vrstvičku bohatou na rtuť. Ořežte do anatomického tvaru.

Tuhnutí je poněkud rychlejší než u konvenčního amalgámu, ale čas na opracování je stejný.

Produkt	Otáčky	Kapsle č.1	Kapsle č.2,3
ANA 2000	3500	8s.	10s.
	4000	6	8
	4500	5	7
	3000	12	14

Doporučeno skladovat do 25°C. Jen pro dentální použití.

Doba míchání se může měnit podle stáří a výkonnosti přístroje. Amalgamátoři s vysokými otáčkami jsou doporučeny.

K zabránění ztráty hmotnosti tablet v důsledku vibrací, skladujte výrobek na pevné podložce.

Nordiska Dental AB, Box 1082, S-262 21 Ängelholm, Sweden.