

BECHTOZID PLUS

(Návod k použití)

Dezinfekční sprej pro rychlé čištění povrchů.

Vlastnosti:

Aktivní složky roztoku hubí bakterie, plísňe a viry HBV/HCV/HIV/BVDV/vaccinia během 1 minuty. Roztok neobsahuje aldehydy ani fenoly, je šetrný ke všem alkoholů odolným materiálům. Je biologicky odbouratelný. Roztok je připraven k přímému použití, neředí se. Neobsahuje hnací plyny. Obal je recyklovatelný.

Použití:

Vydezinfikujte alkoholu odolné plochy po každé návštěvě pacienta. Nastříkejte na sterilní hadřík směrem od těla a otřete příslušný povrch (křeslo, nábytek v dosahu pacienta apod.). Nechte působit požadovanou dobu.

Složení:

100 g spreje Bechtozid Plus obsahuje:
250 mg Benzyl-C12-C18-alkyl dimetyl chloridu
250 mg Didecyl dimetyl amonium chloridu
250 mg C12-C14 ((etyl fenyl) metyl) dimetyl chloridu
20 g etanolu, 10 g 1-propanolu

Upozornění:

S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima. S 26/28: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží ji okamžitě omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46/64: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). S 23: Nevdechujte výpary. S 14: Chraňte před ohněm a všemi zdroji tepelného záření. S 43: V případě požáru použijte CO₂, práškový nebo vodní hasicí přístroj. S 1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S 35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. S 3: Uchovávejte v chladném místě. S 40: Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte vodou. S 59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. Pouze pro odborné použití. Při nutnosti identifikace látky uveďte její výrobní číslo.

R 10 Hořlavý

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

R 10 Hořlavý

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě



Dráždivý

BK64300109

2011 - 06

Art. Nr. 544.5