

ENDOMETHASONE N prášek

Výplň kořenových kanálků

SLOŽENÍ

Hydrocortison acetát 1,00 g
Tymol jodid, barium sulfát, oxid zinku, magnesium stearát 100,00 g

INDIKACE

Trvalý kořenová výplň a pečetidlo v dentálních procedurách se systematickým vkládáním čepů.

VLASTNOSTI

Existují přísná kritéria pro výběr kořenové výplně. Především naprostá tolerance periapikálními tkáněmi – není žádoucí, aby ošetření vznikla v okolí apexu lokální reakce způsobená jakoukoli složkou kořenové výplně.

Výplňová pasta by měla přiléhat ke stěnám kořenového kanálku, neměla by být resorbovatelná nebo podléhat smršňování během času. Výplň by měla mít antiseptický účinek trvajících několik hodin po zaplnění kanálku – vždy existuje možnost, že v kanálku zůstali po extirpaci pulpy zbytky organických hmot. Tento účinek musí přetrvávat dokud pasta tvrdne. Výplň by po ztvdnutí měla být nevstřebatelná, ale odstranitelná. Radioopacita výplně je nutnou podmínkou.

V případě, že se malé množství pasty dostane do kontaktu s měkkými tkáněmi, eugenol proniká do okolí, které je dráždivé, dokud pasta zcela neztuhne. V tomto případě, na rozdíl od pasty v kanálku, se materiál pomalu resorbuje.

POUŽITÍ

Ošetřovaný zub je třeba perfektně izolovat (pomocí tamponu nebo gumového kroužku). Po opatrném upravení kanálku, vyčištění antiseptickým roztokem, opláchnutí a vysušení papírovými čepy, si připravte pastu, a to tak, že prášek budete sypat do eugenolu, dokud nedosáhnete konzistence vazelíny. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje míchat 1 odměrku prášku s 3 kapkami roztoku pro dobu 40-ti sekund.

Poté pomocí lentule vyplňte kořenový kanálek a natlačte pomocí gutaperčového čepu, který byl již předem upraven do tvaru kořenového kanálku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Stejně jako u ostatní plnidel kořenových kanálků, tak i zde musíte kanálek nejdříve upravit, vyčistit a desinfikovat. Je zde riziko bolestivosti v případě aplikace za apex. V případě kontaktu s dásněmi se zde lze setkat s alergickou reakcí. V tomto případě dásně omyjte vodou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě do 25°C a chraňte před vlhkostí.

BALENÍ

14 g nebo 42 g lahvička
3 lahvičky 14 g

Kit: 1 lahvička (14 g prášku) + 1 lahvička (10 ml roztoku)