

Návod k použití

Gi-Mask

Definice:

Coltene Gi-Mask je silikon s dobrými zatékacími schopnostmi, pro výrobu gingiválních masek v zubní laboratoři.

Typ materiálu:

Polysiloxan, kondenzační síťovací silikon-elastomer, nízkoviskózní, pro použití v zubní laboratoři.

ISO 4823, typ 3

Použití:

Coltene Gi-Mask je určen pro rychlou a přesnou rekonstrukci gingivy na modelu v preparačních oblastech.

Zejména pro:

korunky

můstky

implantáty

kombinované a teleskopické práce

Škodlivé účinky:

Při použití k určenému účelu nejsou známy žádné škodlivé účinky.

Vedlejší účinky a interakce:

Polysiloxan má velmi dobrou biologickou snášenlivost. Dosud nejsou známy žádné škodlivé vedlejší účinky.

V případě zasažení očí, dostatečně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Dávkování a míchání:

1) Víčko aplikátoru musí být vždy dobře nasazeno. Před dávkováním víčko odstranit.

Kvůli minimální materiálové ztrátě může být aplikační víčko zkráceno ca. o 1,5 cm.

2) Podle potřeby nalít 5 nebo 10 ml Coltene Gi-mask báze (spodní nebo horní ryska).

3) Otevřít aktivátor a na lahvičku našroubovat dávkovací víčko se stříkačkou.

Důležité: víčko aktivátoru by nemělo být znovu používáno.

4) Aktivátor-tekutinu natáhnout do stříkačky.

Potřebné množství:

0,5 ml aktivátoru na 5 ml báze

1 ml aktivátoru na 10 ml báze

5) Aktivátor opatrně nalít do aplikátoru a stříkačku ihned nasadit na lahvičku.

Pozor! Stříkačka slouží jako uzávěr.

6) Minimálně 20 s. intenzivně míchat, až se vytvoří homogenní růžová směs.

7) Při nasazování víčka musí být aplikátor položen na pevnou podložku. Z lahvičky Coltene Gi-Mask natáhnout do aplikační stříkačky (před tím nasadit špičku).

Aplikace:

Otisk (např. z Coltene Lab-putty) naizolovat (Coltene Gi-mask separator – izolační prostředek) a nasadit na model. Udržovat ve správné poloze. Coltene Gi-mask vpravovat aplikační stříkačkou do prvního otvoru (např. palatinální/linguální) až vytéká protilehlým otvorem (bukální). Pokračovat dalším otvorem (palatinální/linguální), atd. Coltene Gi-mask tvrdne 5 – 7 minut. Ztvrdnutí může být kontrolováno na přebytečném materiálu.

Po ztvrdnutí Coltene Gi-mask může být otisk z modelu sundán. Retenci v oblasti kanálků oddělit a model Coltene Gi-mask pinzetou oddělit od otisku. Případně přebytky odstranit. Dodržujte pokyny z návodu.

Pokyny:

Při styku aktivátoru s pokožkou umýt vodou, mýdlem a kartáčkem, znečištěný oděv vyprat obvyklým způsobem. Vytvrzený silikon je chemicky odolný. Voda, vlhkost nebo alkohol ovlivňují působení aktivátoru. Z tohoto důvodu ihned po použití aplikační stříkačku nasadit na lahvičku, tak aby byla důkladně uzavřená.

Zbytky na konci stříkačky odstranit suchým papírovým ubrouskem. Míchací nádobku čistit suchým papírovým nebo látkovým ubrouskem. Při silném znečištění vyměnit.

Trvanlivost a skladování:

Coltene Gi-mask je použitelný až k datu ukončení platnosti uvedeného na obalu. Skladovat v dobře uzavřeném obalu, při teplotě 15-23°C/59-73 °F a 50 % relativní vlhkosti. Otisky jsou při normální pokojové teplotě zachovány. Chránit před horkem a přímým slunečním zářením.

Označení:

Datum ukončení platnosti a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Technické údaje podle ISO 4823:2000:

Provedeno měření při 23°C /73 °F pokojové teplotě a 50% relativní vlhkosti.

Doba míchání:		20 s.
Celková doba zpracování:	max.	180 s.
Doba vázání:		---
Navrácení do původní polohy při deformaci:		98,28%
Rozměrové změny lineárně:		-0,33%

Vydáno:

červen 2004

Vyčleněno pro zubní lékaře, zubní laboratoře nebo smluvní partnery.

Coltene/Whaledent AG (výrobce)

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41(0)71 757 53 00
Fax +41(0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch