


Test průniku páry pro malé sterilizátory (typu B) dle ČSN EN 867-5

BROWNE TST Helix,

Návod k použití

Příprava:

1. Nejprve zkontrolujte, zda bílý těsnicí O-kroužek víčka není poškozený nebo příliš opotřebený. V případě pochybnosti použijte nové zkušební tělísko.
2. Přesvědčte se, že tělísko i vnitřek kapiláry jsou suché a nejsou vidět žádné zbytky vlhkosti a tělísko není horké. Pokud je zkušební tělísko právě po zkoušce, nechte jej 15 minut vychladnout.
3. Přeložte proužek s indikátorem v polovině tak, aby potisk byl uvnitř a zasuňte přeložený proužek zcela do šterbiny ve víčku tělíska (otevřené konce proužku směřují ven dle vyobrazení).

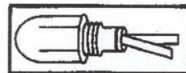

4. Přesvědčte se, že proužek s indikátorem nevystupuje z víčka.
5. Našroubujte víčko na zkušební tělísko. Dva výstupky slouží jako dorazy.

Zkouška:

6. Vložte sestavené zkušební tělísko do sterilizačního obalu délky cca 230 mm a šířky 90 až 140 mm a položte jej na policičku doprostřed sterilizátoru.
7. Do sterilizátoru nevkładějte žádné další předměty a sterilizujte při 134 °C po dobu 3,5 min.
8. Po skončení sterilizace zkušební tělísko co nejdříve, nejdéle do 10 minut, vyjměte.

Poznámka:

Postupujte opatrně, protože zkušební tělísko může být horké.

Vyhodnocení:

9. Odšroubujte víčko zkušebního tělíska, vyjměte proužek s indikátorem a vyhodnoťte indikátor (delší proužek):

Žlutá barva	=	indikátor nebyl exponován
Zbytky žluté, hnědé nebo zelené barvy	=	chyba (nedostatečný průnik páry)
Modrá až fialová barva	=	správně (dostatečný průnik páry)
10. Zapište výsledek a parametry sterilizačního cyklu do sterilizačního deníku. Po sejmutí krycí fólie z rubové strany proužku můžete proužek s indikátorem do deníku vlepít, je-li to požadováno.
11. Jestliže indikátor je správně modře až fialově zbarven v celé své délce, došlo k řádnému odstranění vzduchu z komory sterilizátoru a sterilizátor může být použit ke sterilizaci zdravotnických prostředků dle návodu k použití sterilizátoru.

Poznámka:

Zkušební tělísko uložte se sejmutým víčkem, aby kapilára mohla vyschnout.

Důležité upozornění:

Proužky s indikátorem musí být před i po použití skladovány na chladném, tmavém a suchém místě.

Objednací číslo: 3780 Test průniku páry pro malé sterilizátory - BROWNE TST Helix

Balení: 250 ks indikačních proužků s jedním zkušebním tělískem

Vyrábí: Albert Browne Ltd., Leicester, Velká Británie

Dovází: MEDPLAN spol. s r. o., V Úvalu 84, 151 12 Praha 5, tel.: 257 215 168, 603 510 282 fax: 257 215 169

E-mail: medplan@medplan.cz Website: www.medplan.cz

Skladování: Teplota 0-30 °C, relativní vlhkost 30-60 %, na tmavém místě

(Za stejných podmínek lze uchovávat exponované indikátory pro dokumentační účely bez časového omezení.)

Datum expirace je uvedeno na obalu.

Pozn.: V případě potřeby se s veškerými dotazy a připomínkami laskavě obraťte na dodavatele.