

VOCO

Ufi Gel C

Cartridge/Kartuše



Ufi Gel C je materiál k podkládání protéz na bázi silikonu A, který zůstává dlouhodobě měkký. Autopolymerizující, za studena tuhnoucí Ufi Gel C umožňuje jednoduché a rychlé zpracování. Je ideální ke hotovení měkkých podložek protéz přímo na zubním křesle. Set obsahuje tekuté adhezivum k vytvoření pevného spojení mezi protézou podloženkou, vlastní podložkový materiál stejně jako "Glazing Basis" ležuritu a katalyzátor pro vyhlazení obrousěného povrchu.

Obsah použití:

Permanentně měkké podklady totálních i částečných protéz.

Příprava použití:

Protézu vyčistěte dobře kartáčkem a osušte. Zdrsněte podklad, pomocí alkoholu vysušte. Zdrsněte bukální a linguální okraje do výše asi 3 - 4 mm a zaoblete okraje protézy. Takto připravené plochy, na kterých má přichytit Ufi Gel C, tenca počíte adhezivem. Adhezivum musí pokrýt plochu celou. Upozornění: Lahvičku nakonec ihned uzavřete a skladujte stojící.

Asi 1 minutu nechte protézu vyvětrat.

Kartuše Ufi Gel C nasadíte do míscí pistole. Použijte míscí pistolí VOCO nebo jakoukoliv jinou, jejíž píst odpovídá. Technikou je dáno, že se mohou objevit rozdíly v naplnění komor obou kartuší. Proto po nasazení kartuší do míscí pistole uvolněte uzavěr kartuší a vytlačujte zvolna tak dlouho materiál, až je stejnoměrně vidět v obou vstupních otvorech. Nasadíte míscí kanylu a tlakem na páku vytlačte materiál. V kanyle se materiál automaticky a úplně smíchá ve správném poměru.

Po použití ponechte kanylu na kartuši. Při novém použití odsraňte z otvoru kartuše ztuhlý materiál.

Namíchanou hmotu naneste nejprve na linguální, poté i na bukální okraj. Teprve pak na podklad.

Ufi Gel C by měl mít na podkládaných místech sílu nejméně 2 mm.

Výmě podložení v ústech:

1. Pokryjte všechny části protézy, která jsou v kontaktu se sliznicí s Ufi Gel C, potom ji vložte asi na 1 min. do úst pacienta.
2. Pacient zavře jeho ústa v normální okluzi (1 min.).
3. Potom provádí výškový a polykací pohyby (5 min.).
4. Asi po 7 min. mu vyjměte protézu z úst.
5. Přebytky odstraňte opatrně skalpelem nebo nůžkami.

Dohromady trvá doba zpracování asi 15 minut.

Nepřímé podložení v laboratoři.

Pokud chcete podložení zhotovit v laboratoři, po potažení protézy izolujte sádrový model. Protézu upevněte do artikulatoru a vložte na 10 min. do tlakového hrnce (35° C - 40° C).

Vypracování podložení (rebase).

Přebytky odstraňte jemně nůžkami nebo skalpelem. Doporučuje se po 30 min. (nebo po vyjmutí z tlakového hrnce) práci opacovat. Dřívější obrousění musí být opatrné. Doporučují se vrtáčky a leštící kotouče pro měkké materiály. Chlazení (např. chladič sprej jako DentoCool, jednice a pod.) vypracování usnadní.

Applikační:

K započtení a vyhlazení opracovaných ploch použijte Glazing. Lahvičku držte svisle kapátkem dolů, vzduchová bublina vystoupí vzhůru a dávkování je snadnější. Na míscí destičku naneste stejný počet kapek Glazing Basis a katalyzátoru a homogenně promíchejte štětcem pro jedno použití. Směs pak naneste tímto štětcem tence na odpovídající plochy, to je na funkční okraje. Doba vazby při teplotě v místnosti je asi 10 minut. Vytvrzení lze zkrátit v tlakovém hrnci (35° C - 40° C) na asi 3 minuty.

Pokyny:

Glazing nanásejte jen na opracované plochy (funkční okraje) k jejich započtení, aby se zabránilo usazování zbytků potravy a nebo zabarvením.

Lahvičky po použití ihned uzavřete: Glazing Basis = bílé víčko
Glazing katalyzátor = červené.

Způsob dodávek (balení):

Set 48 ml kartuše, 10 ml adheziv, po 10 ml Glazing
Basis/Katalyzátor míscí kanyly Typ 2 a další
příslušenství Obj.č.2025
Dodatečné balení kartuše 48 ml, míscí kanyly Typ 2 Obj.č.2026

Naše přípravky jsou vyvíjeny pro použití v zubním lékařství. Co se týče použití námi dodávaných přípravků, jsou naše slovní i písemné pokyny či naše rady dány dle nejlepšího vědomí a nezávadně. Našími pokyny a radami nejste zproštěni toho, abyste si ověřili vhodnost našich přípravků pro zamýšlené účely použití. Protože k použití našich přípravků dochází bez naší kontroly, jste za ně odpovědní výhradně sami. Ručíme samozřejmě za jakost našich přípravků podle platných norem, jakož i podle standardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a prodejních podmínkách.

VOCO

05 167 977 / 087

P.O. Box 767 Phone +49 (47 21) 719-0
D-27467 Cuxhaven Fax +49 (47 21) 719-140
Germany